



# Softima<sup>®</sup> 3S

2-delig opvangsysteem met  
hoorbare klik

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Softima® 3S

## 2-delig systeem met hoorbare klik

### 2-delig kliksysteem met geleiding

Softima® 3S is een 2-delige stomalijn met een kliksysteem en handige geleiding voor eenvoudige positionering van het zakje op de huidplaat. Dit zorgt voor een precieze, positionering van het stoma zakje op de huidplaat. Bij dit 2-delig systeem met kliksluiting wordt de ring van het zakje gekoppeld aan de flens van een huidplaat met kliksluiting. De stomadrager hoort aan het klikken dat het stomazakje goed zit. Dit geeft een zeker gevoel. Doordat het zakje een geleiding heeft is het ook geschikt voor stomadragers met visusproblemen.

### Ideaal als de huid te kwetsbaar is voor een 1-delig systeem

De bloemvormige, flexibele huidplaat is gemaakt van huid beschermend hydrocolloïd. De bloemvorm van de huidplaat volgt de contouren van het lichaam en vermindert de kans op plooiën in de huidplaat zodat de huidplaat goed aansluit op de huid. Dit voorkomt lekkage en huidproblemen. Door de zwevende flens kan je met je vingers onder de huidplak en zo kan de stomadrager het zakje zonder druk op de buik aanbrengen.

### Meer bewegingsvrijheid door 3 positioneringsmogelijkheden

De opvangzak gaat met een tabje in een van de 3 sleuven op de huidplaat. De stomadrager kan 3 posities kiezen en zelf bepalen wat handig en prettig is. Dankzij de 3 positioneringsmogelijkheden en de extra bevestiging is er meer bewegingsvrijheid mogelijk.



### Meer zekerheid door extra fixatiemogelijkheid

Met het lipje aan de bovenzijde van het zakje kan de stomadrager het zakje extra fixeren aan de huidplaat. Voor nog meer zekerheid kan de stomadrager het oogje aan de bovenzijde van het zakje om een van de 3 duidelijk voelbare bolletjes op de huidplaat bevestigen.

### Goede grip bij verwijderen

Dit lipje zorgt ook voor een goede grip tijdens het verwijderen van het zakje. Door aan het lipje te trekken terwijl met de andere hand de huidplaat wordt tegengehouden is het vervangen van een stomazakje een eenvoudige handeling.

De Softima® 3S huidplaten zijn vlak of convex (diepte 4mm) waarop zowel een gesloten, leegbaar, high output, of urostomazakje kan geklikt worden.

Wil je ontdekken welke stoma oplossing het best bij jou past?  
Vraag dan een gratis proefpakket aan en ervaar het zelf.

[Lees hier meer](#)



# Softima® 3S

## Gesloten en leegbare stomazakjes met kliksysteem


Het zakje is van geurbestendig plastic en bekleed met een zachte non-woven laag voor meer draagcomfort op de huid van de stomadrager. Het zakje ritselt niet bij het maken van bewegingen.

De zakjes zijn voorzien van een geïntegreerd laminair (meerlaags) filter met een lange werkingsduur; het verwerkingstraject is 25% langer. De filter loopt over de gehele breedte van het zakje en de gehele lengte van de filter wordt benut. Hierdoor bolt het zakje niet op. Door het geïntegreerde filter is er geen contact met de kleding en geen contact met de huid.

### Gesloten zakjes

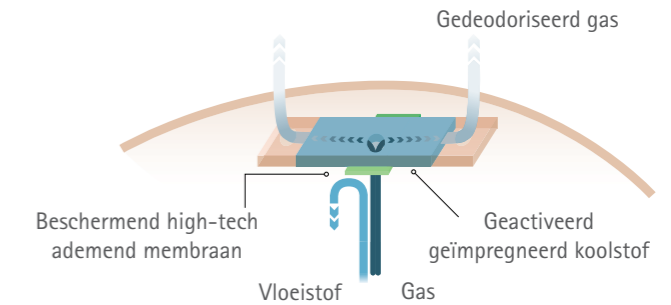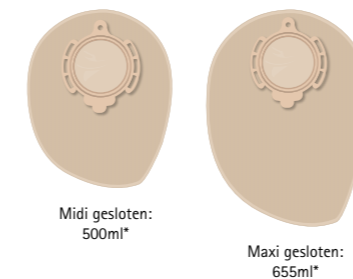


Een filtersticker voor een water- en luchtdichte afsluiting, bijvoorbeeld tijdens baden, douchen en zwemmen, wordt bijgeleverd.

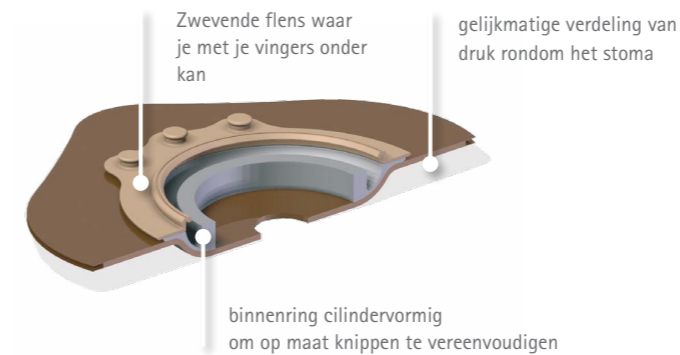

### Softima® 3S huidplaat

- Verkrijgbaar tot 80 mm bij vlakke huidplaat
- 6 mm convexdiepte

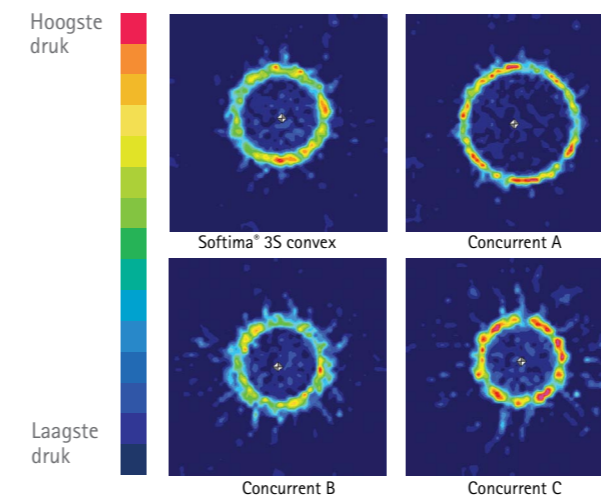

### Drukmeting bij 2-delige stomasystemen


Softima® 3S convex huidplaten geven voldoende druk rondom de stoma ,gelijkmatig verdeeld over het peristomale gebied.

\*Bron: R&D data on file Test Report CR0663 (Mei 2014).

# Softima® 3S

Leegbare zakjes met roll'up sluiting


## In Midi en Maxi uitvoering

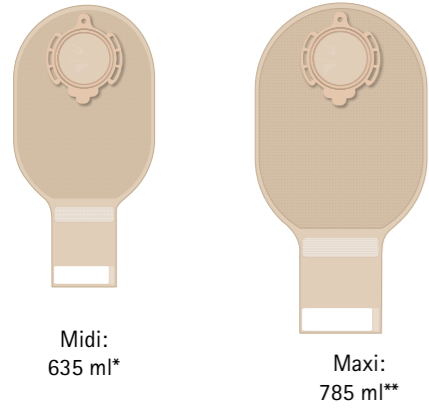

## Handig en veilig sluitsysteem



Uitloop met een geïntegreerde klittenbandsluiting

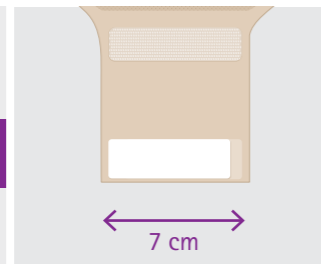


7 cm brede uitloop wat het tussentijds leegmaken vergemakkelijkt



# Softima® 3S Maxi Ileo

Leegbare zakjes met dopsluiting

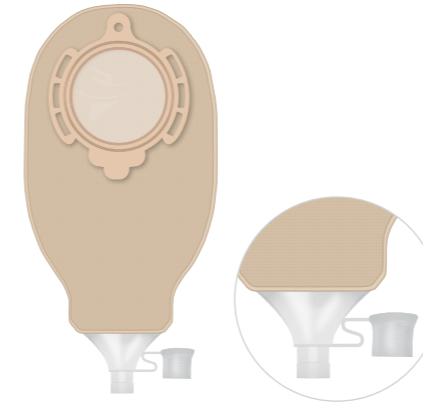

## Voor stomadragers met een High output stoma

Softima® 3S Maxi ileo is een grote opvangzak met dopsluiting voor stomadragers met een high output stoma.

Capaciteit van het zakje is 870 ml - 930 ml, afhankelijk van de grootte van de flens.



Hygiënisch legen van de zak kan via de trechtervormige uitloop met dopsluiting met een diameter van 14 mm aan de onderzijde van de zak.

## Betere nachtrust met een Flow collector tijdens de nacht

Dit systeem met dopsluiting is veilig aan te sluiten op de Flow Collector, een opvangzak met 2 liter extra opvangcapaciteit voor tijdens de nacht. Deze oplossing in combinatie met het leegbare Softima® 3S high-flow zakje is ontwikkeld om de nachtrust van stomapatiënten met een high output stoma te verbeteren

## Positieve feedback

Uit een in Frankrijk uitgevoerd observationeel onderzoek bij 27 stomadragers met een high output stoma die de Flow Collector gebruikten, bleek dat de frequentie van het leegmaken van het zakje in 70% van de gevallen is afgenomen van eenmaal per 4 uur tot eenmaal per 24 uur.

90% van de stomadragers gaf aan dat de Flow Collector hun levenskwaliteit had verbeterd omdat het bijdroeg aan een betere ongestoorde slaap.




# Softima® 3S Uro

## Voor stomadragers met een urinestoma

Softima® 3S Uro Midi is een opvangzakje met aftapkraantje. Het zakje heeft een anti-refluxsysteem, waardoor de urine niet terugstroomt over de huidplaat en zich verdeelt over het zakje. Hierdoor is er minder kans op lekkage.

### Eenvoudig te openen en te legen


Door het draaikraantje aan de onderzijde van het zakje, is het zakje eenvoudig te openen en te legen. Het kraantje heeft een duidelijk voelbare open- en dichtstand, handig bij visusproblemen. Het antidruppelsysteem voorkomt spetteren en urine op je handen bij het legen van het zakje.

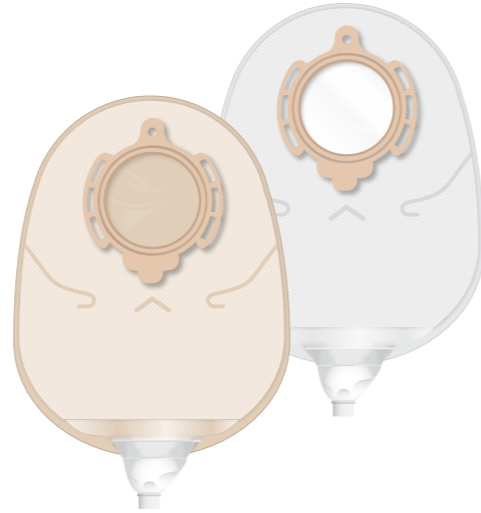

Dicht



Open

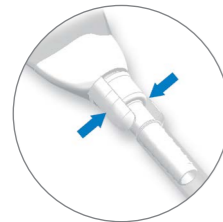

Universele verbinding



Inhoud: 2 liter

Voor de nacht kan er met een bijgeleverde universele connector een nachtopvangzak met extra opvangcapaciteit van 2 liter aangesloten worden. Dit bevordert de nachtrust. De universele verbinding draait mee met de bewegingen van de stomadrager waardoor de slang niet afknelt.

# Assortiment

## Softima® 3S huidplaat - 10 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)
936415K	15997359	45/15-30 ✂
936420K	15997367	45/20
936425K	15997375	45/25
936430K	15997383	45/30
936515K	15997391	55/15-40 ✂
936535K	15997405	55/35
936540K	15997413	55/40
936615K	15997421	65/15-50 ✂
936645K	15997448	65/45
936815K	16017110	80/15-65 ✂

✂ Uitknipbaar

## Softima® 3S convex huidplaat - 5 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)
937415K	16017129	45/15-26 ✂
937425K	16017145	45/25
937515K	16017153	55/15-36 ✂
937530K	16017161	55/30
937615K	16017196	65/15-46 ✂

✂ Uitknipbaar

## Softima® 3S gesloten zakje - 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi	931045K	15997308	45	●
± 500 ml	931055K	15997316	55	●
	931065K	15997324	65	●
Maxi	931445K	15997278	45	●
	931455K	15997286	55	●
	931465K	15997294	65	●
	931480K	16017234	80	●



**Softima® 3S leegbaar zakje Roll'Up – 30 stuks per verpakking**

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 635 ml	932045K	16018001	45	●
	932055K	16018028	55	●
	932065K	16018036	65	●
	932145K	16018044	45	○
	932155K	16018052	55	○
	932165K	16018060	65	○
Maxi ± 770 ml	932445K	16018079	45	●
	932455K	16018087	55	●
	932465K	16018095	65	●
	932480K	16018109	80	●
	932545K	16018117	45	○
	932555K	16018125	55	○
	932565K	16018133	65	○
	932580K	16018141	80	○

○ Transparent

**Softima® 3S ileo High flow– 30 stuks per verpakking**

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Maxi ± 940 ml	933055K	16018168	55	●
	933065K	16018176	65	●
	933080K	16018184	80	●
	933155K	16018192	55	○
	933165K	16018206	65	○
	933180K	16018214	80	○

● Split Cover | ○ Transparent

**Flow Collector High output**

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Verpakkingseenheid
2000 ml	039901K	15196291	5 stuks
	039900K	15009181	15 stuks

**Softima® 3S urozakje – 20 stuks per verpakking**

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 650 ml	934045K	15997456	45	●
	934055K	15997464	55	●
	934065K	15997472	65	●
	934145K	15997480	45	○
	934155K	15997499	55	○
	934165K	15997502	65	○

● Split Cover | ○ Transparent

**Urimed® Plus urine nachtzak**

Artikelnummer	Z-indexnummer	Lengte slang	Verpakkingseenheid
28300A	15826236	120 cm	10 stuks
28300K	15435156	120 cm	30 stuks

